

Krem proktologiczny z kwasem hialuronowym i ekstraktem z Aloe Vera

Krem wspomagający naturalny proces gojenia kanału odbytu i odbytnicy. Przynosi ulgę w bólu, świądzie i pieczeniu, nawet w przypadku łagodnych zmian pooperacyjnych.

PRZEZNACZENIE

Krem zawierający kompleks srebra TIAB to wyrób medyczny wspomagający leczenie objawów związanych z hemoroidami (zewnątrznymi i wewnętrznymi), takich jak ból, podrażnienie i świąd okolicy odbytu. Wspomaga i przyspiesza naturalne procesy regeneracji i gojenia w przypadku hemoroidów, szczelin odbytu lub urazów powstałych w wyniku leczenia chirurgicznego.

Hemoroidy i szczeliny odbytu mogą być uciążliwym powikłaniem zaparć, niewłaściwej diety, siedzącego trybu życia, ciąży, wynikiem predyspozycji lub następstwem chorób ogólnoustrojowych.

Produkt ma postać kremu na bazie kwasu hialuronowego, ekstraktu z *Aloe vera* i kompleksu TIAB (molekuła monowalentnych jonów srebra związana kowalencyjnie z mikrokryształami dwutlenku tytanu).

Dzięki natłuszczającym, łagodzącym i odświeżającym właściwościom składników produkt przynosi ulgę w bólu (spowodowanym przez tarcie podczas wypróżnień), świądzie i pieczeniu odbytu i okolic odbytu spowodowanym przez hemoroidy i szczeliny odbytu, często występującym także u kobiet w ciąży i po ciąży.

Produkt działa wielotorowo:

- izoluje obszar zajęty przez zewnętrzne mikroorganizmy (efekt bariery)
- ogranicza kolonizację zewnętrznych czynników chorobotwórczych w miejscu stosowania

- tworzy korzystne warunki do naturalnej regeneracji tkanki nawet po nieskomplikowanej operacji proktologicznej w mikrośrodkowisku rany

Stosowanie produktu kilka razy dziennie na obszarze dotkniętym zmianami pomaga zwiększyć fizjologiczną elastyczność i nawilżenie skóry oraz błony śluzowej odbytu i okolic odbytu, a tym samym zapewnia szybsze ustąpienie objawów.

Sposób użycia - wewnątrznie (kanał odbytu) (opakowanie z 1 aplikatorem):

- 1) Przed użyciem należy oczyścić i dokładnie wysuszyć miejsce aplikacji.
- 2) Odkręcić nakrętkę tuby i drugą jej stroną przebić aluminiową membranę zabezpieczającą (tylko przy pierwszym otwarciu).
- 3) Nakręcić aplikator w kształcie kaniuli na tubę w miejsce nakrętki.
- 4) Delikatnie wsunąć aplikator do odbytu i wycisnąć odpowiednią ilość kremu, aby pokryć nim obszar dotknięty zmianami.
- 5) Odkręcić aplikator.
- 6) Umyć aplikator po użyciu.
- 7) Dokładnie umyć ręce.
- 8) Zamknąć tubkę nakrętką.

Sposób użycia - zewnątrznie - (okolice odbytu):

- 1) Przed użyciem należy oczyścić i dokładnie osuszyć miejsce aplikacji.
- 2) Odkręcić nakrętkę tubki i drugą jej stroną przebić aluminiową membranę zabezpieczającą (tylko przy pierwszym otwarciu).
- 3) Wykonując delikatne masujące ruchy, należy nałożyć produkt bezpośrednio na obszar dotknięty zmianami (okolice odbytu).
- 4) Po użyciu umyć ręce i dokładnie zamknąć tubkę nakrętką.

DAWKOWANIE

Zaleca się stosowanie produktu dwa razy dziennie i każdorazowo po wypróżnieniu lub częściej, jeśli to konieczne.

OSTRZEŻENIA

- Produktu nie należy używać do celów innych niż wskazane w instrukcji użycia wyrobu;
- Przed nałożeniem produktu należy dokładnie umyć ręce;
- Po nałożeniu produktu nie należy masować zmienionego miejsca i pozwolić, aby produkt wchłonął się, tworząc ochronny film;
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu należy natychmiast przemyć je wodą;
- Nie używać produktu po dacie ważności wydrukowanej na opakowaniu;
- **Jeden aplikator może być używany wyłącznie przez jedną osobę;**
- Nie zamrażać;
- Trzymać z dala od dzieci;
- Do użytku miejscowego;
- Nie stosować doustnie;
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte;
- Po użyciu dokładnie zamknąć tubę
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników;
- Zaprzestać stosowania w przypadku nietypowych reakcji skórnych;
- W przypadku krwawienia należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek preparatu;

- **Przed rozpoczęciem stosowania PROCTO-ZAC® SILVER w ciąży lub okresie karmienia, z uwagi na brak konkretnych danych dotyczących stosowania, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.**

PRZECIWSKAZANIA

Brak jest znanych objawów przedawkowania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Preparatu nie wolno stosować w połączeniu z innymi lekami stosowanymi miejscowo.

SKŁAD

Woda, eter stearylowy polipropylglikolu 15, Steareth-2 (alkohol stearylowy oksyetylowany 2 molami tlenu etylenu), kwas stearynowy, gliceryna, molekula monowalentnych jonów srebra związana kowalencyjnie z mikrokryształami dwutlenku tytanu, alkohol cetearylowy, dimetykon, Steareth-21 (alkohol stearylowy oksyetylowany 21 molami tlenu etylenu), ekstrakt z *Aloe barbadensis*, etyloheksylogliceryna, hialuronian sodu, octan tokoferolu, chlorek benzalkoniowy, diizotionian heksamidyny, sól dwusodowa kwasu wersenowego, wodorotlenek sodu.

WARUNKI PRZECZOWYWANIA

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Pod wpływem promieni słonecznych zawartość tuby może ulec zabarwieniu na lekko żółty kolor. Nie wpływa to na działanie i charakterystykę produktu.

OPAKOWANIE

Tuba 25 ml z 1 aplikatorem do aplikacji

Data przeglądu:
Marzec 2020



Producent:
NTC S.r.l.
Via Luigi Razza 3
20124 Mediolan,
Włochy

Dystrybutor:
Hexanova Sp. z o.o.
ul. Brukowa 36
05-092 Łomianki
Polska

Hexanova®

